


АППЛИКАТОР АКУПУНКТУРНЫЙ ИНЬ-ЯНЬ

Артикул: F 0122

FOSTA[®]
health & sport support

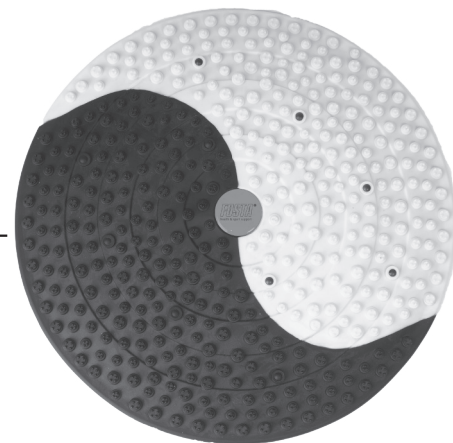

Применение

До и после процедуры выпейте стакан минеральной воды.




Для стоп

- Встаньте на аппликатор обеими ногами, произвольно переступайте на месте или двигайтесь по нему. Процедуру проводите 10 мин.
- **Результат:** улучшение кровообращения.
- Подходит для пожилых людей, людей активно не занимающихся спортом, испытывающих болевые ощущения в мышцах.



Для пяток

- Встаньте на аппликатор пятками, двигайтесь по нему поочередно в левую и в правую сторону. Процедуру проводите 10 мин.
- **Результат:** положительное влияние на пищеварительную систему.
- Подходит для людей среднего возраста, работающих взрослых, людей испытывающих усталость.

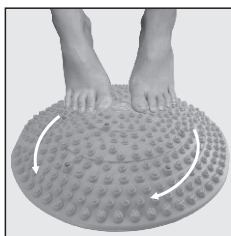

Для пальцев ног

- Встаньте на аппликатор пальцами ног, двигайтесь по нему поочередно в левую и в правую сторону. Процедуру проводите 5 мин.
- **Результат:** снижение стресса, снижение болевого синдрома.
- Подходит для домохозяек, работающих взрослых, людей испытывающих нехватку сна, стресс.



Для расслабления

- Поставьте ноги на платформу аппликатора во время работы за столом, отдыха на диване. Процедуру проводите 20 мин.
- **Результат:** расслабление организма. Улучшение кровообращения.
- Подходит для работающих взрослых, людей с избыточным весом, пожилых, людей активно не занимающихся спортом.
- Процедуры можно повторять много раз.